

RESALIVA odběrová souprava


Návod k použití



1 Před samotným odběrem **30 min.** **nejezte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa.**




2 Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

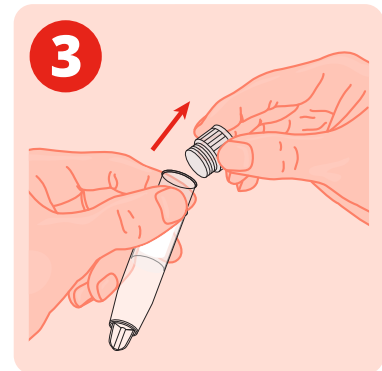

3 Opatrně otevřete zkumavku s tyčinkou na sliny.



4 Tyčinku vložte do úst.

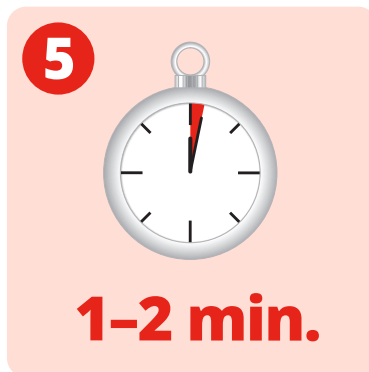


5 **1-2 min.**

Tyčinku nechte v ústech **1-2 min.** bez žvýkání.




6 Tyčinku ústy vložte do zkumavky.

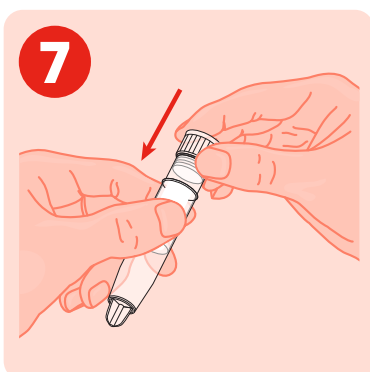

7 Zkumavku pořádně zavřete.



8 Na zkumavku nalepte přiložený čárový kód, tak aby byl pouze na dolní části odběrové zkumavky.

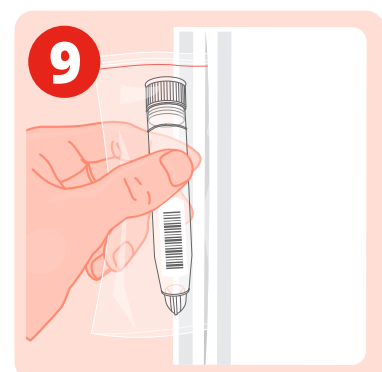

9 Zkumavku vložte v igelitovém sáčku do obálky a odešlete do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com